


LANAFORM®



DT-100 DIGITAL THERMOMETER

FLEXIBILE

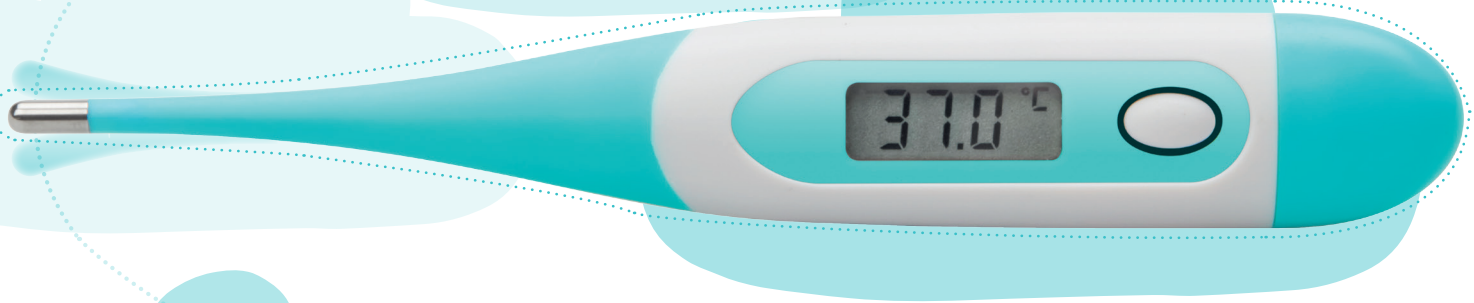



Om te weten of uw kind koorts heeft, zult u zijn **temperatuur** moeten nemen. We spreken vaak van **koorts** als de **lichaamstemperatuur meer dan 38°C bedraagt**. De lichaamstemperatuur varieert in de loop van de dag.

Met deze **thermometer DT-100**, die **precisie en gebruiksvriendelijkheid** combineert, kunt u de **rectale, orale of axillaire temperatuur van uw baby en kind** meten. Dankzij zijn zeer soepele uiteinde is de **'DT100'** zeer **comfortabel en zacht voor uw baby**.

Hij meet de temperatuur heel snel, in slechts 10 seconden. De thermometer is geschikt voor thuisgebruik, wat voor ouders heel gemakkelijk is.



Tips :

- Gebruik bij voorkeur een elektronische rectale thermometer
- Leg uw baby op zijn rug
- Wrijf het rubberen uiteinde in met een crème die het glijden vergemakkelijkt (vaseline of luiercrème).
- Neem de temperatuur van uw baby door de thermometer zachtjes in het rectum te laten glijden, tot een diepte van maximaal 2,5 cm.
- Na enkele seconden geeft de thermometer een geluidssignaal.
- Trek de thermometer terug en lees de temperatuur af.

Dit is de betrouwbaarste en goedkoopste manier om de temperatuur van uw baby te meten.



KENMERKEN :



Flexibele punt



Meeteenheid
in °C en °F



3 mogelijkheden
om de temperatuur
te meten: rectaal,
axillair, oraal



Meetresultaat
binnen 10
seconden



Koortsalarm
bij een
temperatuur
van meer dan
37,8 °C



Weergave
van de laatste
meting



Waterbestendig



Automatisch



























Wist u dit al ?



De ochtend en het einde van de dag zijn de beste momenten om de temperatuur van een baby te nemen. Vermijd daarentegen metingen net na de maaltijd, het bad of het dutje, want die activiteiten beïnvloeden de lichaamstemperatuur. Wacht 20 minuten voor u begint.

Technologie Meetplaats-mogelijkheden Eenheid Scherm met achtergrondverlichting Batterij Alarm Automatische uitschakeling Geheugen Duur van de meting

	DT-100 LA090113	sensor				1x LR41				10"	
	Baby Stone LA090111	sensor				1x CR2032		 		5"	
	Thermometer 4in1 LA090103	infrarood				1x CR2032		 		1"	



Ref. LA090113
Ean Code : 5410984067329



Afmetingen Master Carton
54.5 x 29 x 37 cm



Gewicht Master Carton
12 kg



Colour Boxes / Master Carton
300



Afmetingen Color Box
16.2 x 4.7 x 1.8 cm



Gewicht Color Box
18 g



Spanning/vermogen
1 x LR41



Rue de la Légende, 55 · 4141 Louveigné, Belgium · Tel. : +32 (0)4 360 92 91 · Fax : +32 (0)4 360 97 23
www.lanaform.com · info@lanaform.com

